

Probenstabilität unzentrifugierter Primärproben	Version 01	Datum: 14.05.2025	Seite 1 von 4
--	------------	-------------------	---------------

Liste zu unserem Laborkonzept

Probenstabilität der unzentrifugierten Primärprobe in der Praxis (vor der Abholung)

Als maximalen Lagerungszeitraum wurden 72 Stunden gewählt, um Probengewinnung von Freitag Nachmittag über das Wochenende bis zur Abholung Montags zu gewährleisten. Einige Untersuchungen sind auch über diesen Zeitraum stabil. Wir haben dennoch aus Gründen der Übersichtlichkeit und der realen Praxis diesen Zeitraum festgelegt.

Parameter	Material	Stabilität in Stunden	Lagertemperatur
AAK AMA	Serum	72	4 - 8 °C
AAK C ANCA	Serum	72	4 - 8 °C
AAK DNS Doppels	Serum	72	4 - 8 °C
AAK ENDOMYSIUM A	Serum	72	4 - 8 °C
AAK GLIADIN	Serum	72	4 - 8 °C
AAK/ENA	Serum	72	4 - 8 °C
AB0 BESTIMMUNG	Vollblut	72	4 - 8 °C
ADENO VIREN EIA	Serum	72	4 - 8 °C
AFP	Serum	72	4 - 8 °C
AK- IND COOMBS	Serum	72	4 - 8 °C
ALBUMIN S	Serum	72	4 - 8 °C
ALBUMIN U	Urin	72	4 - 8 °C
ALPHA-1-ANTITR	Serum	24	4 - 8 °C
AMOEBEN EIA	Stuhl	24	4 - 8 °C
AMYLASE	Serum	72	4 - 8 °C
ANA SCREEN ELISA	Serum	72	4 - 8 °C
ANA SCREEN HEP2	Serum	72	4 - 8 °C
ANDROSTENDION	Serum	72	4 - 8 °C
AP	Serum	72	4 - 8 °C
B-STREPTOKOKKEN A	Abstrich	72	RT
BILIRUBIN	Serum	72	4 - 8 °C
BILIRUBIN DIREKT	Serum	72	4 - 8 °C
BLUTBILD GROSS	EDTA	24	RT
BLUTBILD KLEIN	EDTA	72	RT
BLUTZUCKER	NAF	72	4 - 8 °C
BORRELIEN	Serum	72	4 - 8 °C
BSG1 STD	EDTA	6 (RT) 24 (4 - 8°C)	RT / 4 - 8 °C
CA 125	Serum	72	4 - 8 °C
CA 153	Serum	72	4 - 8 °C
CA 199	Serum	72	4 - 8 °C
CALCIUM	Serum	72	4 - 8 °C
CALPROTECTIN	Stuhl	24	4 - 8 °C
CAMPYLOBACTER EIA	Stuhl	24	4 - 8 °C
CAMPYLOBACTER KULTUR	Stuhl	24	4 - 8 °C
CANNABINOIDE	Urin	72	4 - 8 °C

Probenstabilität unzentrifugierter Primärproben	Version 01	Datum: 14.05.2025	Seite 2 von 4
--	------------	-------------------	---------------

CCP	Serum	72	4 - 8 °C
CEA	Serum	72	4 - 8 °C
CHLAMYDIA TRACH.	Urin / Abstrich	72	4 - 8 °C
CHLAMYDIA TRACH.	Serum	72	4 - 8 °C
CHLORID	Serum	72	4 - 8 °C
CHOLESTERIN	Serum	72	4 - 8 °C
CHOLESTERIN HDL	Serum	72	4 - 8 °C
CHOLESTERIN LDL	Serum	72	4 - 8 °C
CHOLINESTERASE	Serum	72	4 - 8 °C
CK MB	Serum	72	4 - 8 °C
CK NAC AKT	Serum	72	4 - 8 °C
CLOSTRIDIOTOXIN	Stuhl	24	4 - 8 °C
CORONA IGG	Serum	72	4 - 8 °C
CORONA PCR	Abstrich	72	4 - 8 °C
CORTISOL	Serum	72	4 - 8 °C
CRP QUANT	Serum	72	4 - 8 °C
CYTOMEGALIE IGG	Serum	72	4 - 8 °C
D DIMERE	Citrat	24	RT
RAST (SPEZ.IGE)	Serum	24	4 - 8 °C
SPEZ.IGE (RAST)	Serum	24	4 - 8 °C
DHEAS	Serum	72	4 - 8 °C
DIAMINOXYDASE	Serum	72	4 - 8 °C
EBV EA	Serum	72	4 - 8 °C
EISEN	Serum	72	4 - 8 °C
EIWEISS IM URIN	Urin	72	4 - 8 °C
ERYTHROPOIETIN	Serum	12	4 - 8 °C
ESTRADIOL	Serum	72	4 - 8 °C
FAI	Serum	72	4 - 8 °C
FERRITIN	Serum	72	4 - 8 °C
FOLSAEURE	Serum	6	4 - 8 °C
FREIE Leichtketten	Serum	72	4 - 8 °C
FSH	Serum	72	4 - 8 °C
FT3	Serum	12	4 - 8 °C
FT4	Serum	12	4 - 8 °C
GAMMA GT	Serum	72	4 - 8 °C
GES OHNE ELPHO	Serum	72	4 - 8 °C
GESAMTEIWEISS	Serum	72	4 - 8 °C
GFR MAYO KLINIK	Serum	72	4 - 8 °C
GONOKOKKEN PCR	Abstrich / Urin	72	4 - 8 °C
GOT ASAT	Serum	72	4 - 8 °C
GPT ALAT	Serum	72	4 - 8 °C
HA IGG	Serum	72	4 - 8 °C
HA IGM	Serum	72	4 - 8 °C
HAPTOGLOBIN	Serum	72	4 - 8 °C
HARNSAEURE	Serum	72	4 - 8 °C
HARNSTOFF	Serum	72	4 - 8 °C

Probenstabilität unzentrifugierter Primärproben	Version 01	Datum: 14.05.2025	Seite 3 von 4
--	------------	-------------------	---------------

HB C AK	Serum	72	4 - 8 °C
HB S AG	Serum	72	4 - 8 °C
HB S AK	Serum	72	4 - 8 °C
HBA1C	EDTA	72	RT
HCG BETA	Serum	12	4 - 8 °C
HELICOBACTER	Stuhl	24	4 - 8 °C
HEPATITIS C AG	Serum	12	4 - 8 °C
HEPATITIS C AK	Serum	72	4 - 8 °C
HISTAMIN	EDTA	6	RT
HIV 1 2	Serum	72	4 - 8 °C
HLAB 27	EDTA	72	RT
HOLOTRANSCOBALAMIN	Serum	72	4 - 8 °C
HOMOCYSTEIN	Serum	72	4 - 8 °C
IGA	Serum	72	4 - 8 °C
IGE	Serum	72	4 - 8 °C
IGG	Serum	72	4 - 8 °C
IGM	Serum	72	4 - 8 °C
IMMUNFIXATION	Serum	72	4 - 8 °C
KALIUM	Serum	6 / (zentrifugiert 72)	RT / (4 - 8 °C)
KULTUR BAKTERIEN AEROB	Serum	72	4 - 8 °C
KULTUR ANAEROB	Serum	72	4 - 8 °C
KUPFER	Serum	72	4 - 8 °C
LAMBLIEN	Serum	24	4 - 8 °C
LDH	Serum	3 - 6 / (zentrifugiert 72)	RT / (4 - 8 °C)
LH	Serum	72	4 - 8 °C
LIPASE	Serum	72	4 - 8 °C
LIPOPROTEIN A	Serum	72	4 - 8 °C
LUES-AK	Serum	72	4 - 8 °C
MAGNESIUM	Serum	24	4 - 8 °C
MASERN IGG EIA	Serum	72	4 - 8 °C
MONO SCHNELLTEST	Serum	72	4 - 8 °C
MYKOPLASMEN KULTUR	Stuhl	72	4 - 8 °C
NATRIUM	Serum	72	4 - 8 °C
NIPT PRAENAT	Serum	7 Tage	RT
NOROVIRUS	Stuhl	72	4 - 8 °C
NT-PRO-BNP	Serum	72	4 - 8 °C
PANKREAS ELASTASE	Stuhl	72	4 - 8 °C
PARATHORMON	Serum	6	RT
PARVO IGG EIA	Serum	72	4 - 8 °C
PHOSPHAT	Serum	72	4 - 8 °C
PILZKULTUR	Serum	72	4 - 8 °C
PROCALCITONIN	Serum	24	4 - 8 °C
PROGESTERON	Serum	72	4 - 8 °C
PROLAKTIN	Serum	72	4 - 8 °C
PSA	Serum	72	4 - 8 °C

Probenstabilität unzentrifugierter Primärproben	Version 01	Datum: 14.05.2025	Seite 4 von 4
--	------------	-------------------	---------------

PSA FREI	Serum	12	4 - 8 °C
PTT	Citrat	12	RT
QUICK INR auch unter Marcumar	Citrat	72	RT
RETICULOZYTEN i. EDTA	EDTA	24	RT
RHESUSFAKTOR	Vollblut	72	4 - 8 °C
RHEUMAFAKTOR	Serum	72	4 - 8 °C
ROETELN	Serum	72	4 - 8 °C
ROTA VIREN ELISA	Serum	72	4 - 8 °C
S 100 PROTEIN	Serum	8	4 - 8 °C
SERUM ELEKTROPHORESE	Serum	72	4 - 8 °C
SELEN	Serum	72	4 - 8 °C
SERUMGLUCOSE	Serum	6 / (zentrifugiert 72)	4 - 8 °C
SHBG	Serum	72	4 - 8 °C
STAPHYLOLYSIN	Serum	72	4 - 8 °C
STREPTOLYSIN	Serum	72	4 - 8 °C
STUHLKULTUR	Stuhl	48	4 - 8 °C
TAK/THYREOGLOBULIN-AK	Serum	72	4 - 8 °C
TB KULTUR KONVENTIONELL	Sputum	12	4 - 8 °C
TBC GOLD TEST	Spezialröhrchen	6	4 - 8 °C
TESTOSTERON	Serum	72	4 - 8 °C
TOXO SUCHTEST	Serum	72	4 - 8 °C
TPO	Serum	72	4 - 8 °C
TRANSFERRIN REZ	Serum	72	4 - 8 °C
TRANSFERRIN	Serum	72	4 - 8 °C
TRIGLYCERIDE	Serum	72	4 - 8 °C
TROPONIN I	Serum	8	4 - 8 °C
TRYPTASE	Serum	48	4 - 8 °C
TSH BASAL	Serum	72	4 - 8 °C
TSI TRAK	Serum	72	4 - 8 °C
URINSEDIMENT	Urin	12	4 - 8 °C
USTAT Status	Urin	12	4 - 8 °C
VARIZELLA ZOSTER VIRUS	Serum	72	4 - 8 °C
VD 25 HY CHOLE	Serum	72	4 - 8 °C
VITAMIN B1	EDTA	6	4 - 8 °C
VITAMIN B12	Serum	48	4 - 8 °C
VITAMIN B6	Serum	6	4 - 8 °C
YERSINIEN Serologie	Serum	72	4 - 8 °C
ZINK	Serum	4	4 - 8 °C

RT = Raumtemperatur, nicht der Sonne ausgesetzt 18 - 25 ° C